

الفحص الذكي المنزلي


كيفية استخدام فحص كوفيد-19 الذكي من iHealth

1

الخطوة 1:

تحضير المواد


تحتوي مجموعة الفحص على ما يلي:

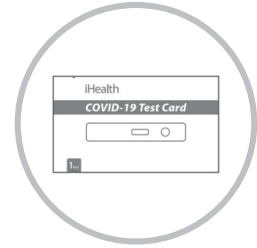

● بطاقة فحص كوفيد-19



● أنبوب مملوء بسائل الفحص

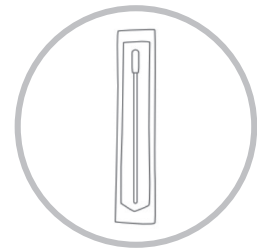

● مسحة

عندما تكون جاهزاً لمتابعة الفحص، افتح الكيس القصديري لبطاقة فحص كوفيد-19

2

الخطوة 2:

جمع العينة



قم بإزالة المسحة من عبوتها

لا تلمس طرف المسحة بأصابعك

احتفظ بعبوة المسحة لاستخدامها لاحقاً



أدخل طرف المسحة بالكامل برفق (عادةً من 1/2 إلى 3/4 بوصة (في فتحة أنفك

مع الأطفال، فإن أبعد ما يمكنك إدخال المسحة في فتحة الأنف قد يكون أقل من 1/4

بوصة، وقد تحتاج إلى شخص آخر يمسك رأس الطفل أثناء المسح

امسح المسحة داخل فتحة أنفك في دائرة 5 مرات على الأقل

امسح بقوة وببطء - خذ 15 ثانية على الأقل لجمع العينة وتأكد من جمع أي إفرازات من

الأنف على المسحة باستخدام المسحة نفسها، كرر العملية مع فتحة الأنف الأخرى



قد تحصل على نتيجة فحص غير صحيحة إذا لم تجمع عينة كافية باستخدام المسحة

الخطوة 3:


معالجة العينة




اضغط على الأنبوب عمودياً على طاولة وقم بلف الغطاء البرتقالي الكبير لفتح



قل رأس المسحة في قاع الأنبوب 15 مدة على الأقل

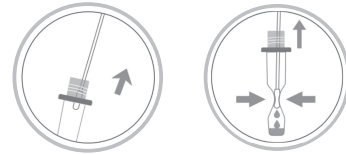

اضغط على جوانب الأنبوب للحصول على أكبر قدر ممكن من العينة من المسحة
قد لا يكون هناك عينة كافية من المواد لإجراء فحص بشكل صحيح إذا لم تضغط على المسحة

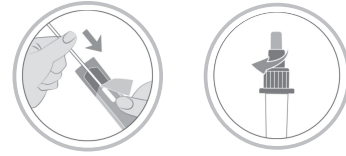

أخيراً ج المسحة وأغلق الغطاء البرتقالي الكبير للأنبوب عن طريق لفة

ضع المسحة مرة أخرى في العبوة للتخلص منها

الخطوة 4:

إضافة العينة



عينتك الآن في الأنبوب

لفحص عينتك، افتح الغطاء الأبيض الصغير للأنبوب عن طريق لفة

أضف 3 قطرات من العينة إلى منفذ العينة ببطاقة فحص كوفيد-19

أغلق الغطاء الأبيض الصغير عن طريق لفة

انتظر 15 دقيقة حتى تتهز نتائجك

ابدأ المؤقت فوراً بعد إضافة العينة إلى منفذ العينة. ستكون النتيجة جاهزة خلال 15 دقيقة وستكون غير صالحة بعد 30 دقيقة.

قد تحدث نتيجة سلبية أو إيجابية خاطئة إذا تمت قراءة نتيجة الفحص قبل 15 دقيقة أو بعد 30 دقيقة.

تفسير النتائج



نتيجة فحص سلبية



نتائج فحص إيجابية



لاحظ أن الخط T قد يكون باهتاً.

يجب أن تظهر النتيجة الإيجابية كلاً من خط C وخط T. تعني النتيجة الإيجابية أن الفرد مصاب بمرض كوفيد-19.

تفضل بزيارة mass.gov/COVIDselftest لمعرفة ما يجب القيام به. يجب عليك التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن نتيجة الإيجابية، خاصة إذا كان لديك أي حالات صحية تعرضك لخطر الإصابة بمرض خطير من كوفيد-19.

النتيجة غير الصالحة: إذا لم يكن هناك خط، أو إذا كان هناك خط T فقط، فإن الفحص لا يعمل بشكل صحيح. سوف تحتاج إلى إعادة الفحص باستخدام مجموعة فحص جديدة. إذا كانت نتيجةك الجديدة غير صالحة أيضاً، فقم بإجراء الفحص في أحد مواقع الفحص أو اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

التخلص من مجموعة الفحص: بعد إكمال الفحص، تخلص من مكونات المجموعة في القمامة.

، رصالحا لا لاثمها ليس يلع ، كلذ يف امب دمدمال تامولعمل القدب قلعتي اميف ، فينمض وأ عحيرص ، عون ي أنم تانامض وأ تادهعت ي أسامالك عطاقم مدقت ال تاميلعتلأ يف قدراو نوكت دق قد مدع وأ وهس وأ ءاطخأ ي أع نعي لوؤسمل أضي أسامالك عطاقم لمحتت ال .نيعم مادختسا وأ ضرغ يأل اهتءالم

رطاخلما عيمجو ي ألمحتتو ، تامولعملما هذم مادختسا اهيلع يوطني يتلارطاخلما ريذقتو أمامت مهفت كنأب رقت كنإف ، تاميلعتلأ هذم لإل لوصولا لالخنم تاميلعتلأ يف قدراو نوكت دق ءاطخأ يأل عقلتعملما وأع نعيئشانلأ